

Barres parallèles réf: EN.BP

Idéal pour les exercices de marche et d'équilibre tout comme la recherche d'appuis avec les membres supérieurs (longueur 2m x 0.60 largeur préconisée 60 à 71cm)



EN.BPat version métal/terrasse



EN.BP version bois à sceller

Travail de stabilisation et de verticalisation du corps, équilibre bipodal, les yeux ouverts puis les yeux fermés. Marche avec et sans appuis en avant et en arrière.



EN.BPa version métal à sceller en 2m48.



EN.BPt version bois pour terrasse

La marche

Barres fixes réf: EN.BF

Déplacement latéral.

- ❑ En fauteuil slalom entre les poteaux, travail de traction.
- ❑ Passez sous l'obstacle, plier les genoux...
- ❑ Equilibre statique : debout devant une barre, les yeux fermés.
- ❑ Equilibre sur la pointe des pieds, sur un pied.
- ❑ déplacer la barre mobile, lancer une balle au dessus ou entre les barres.



La marche



Les équipements présentés existent en quatre versions.

1. Bois et inox à sceller au béton.
2. Bois et inox fixation par des platines.
3. Alu, inox et HPL à sceller au béton.
4. Alu, inox et HPL fixation par des platines.



Slalom réf: EN.SL

Travail d'équilibre suite à un changement de direction.

Atelier sur les appuis, l'équilibre et le regard. Les repères visuels étant l'obstacle à contourner, ici les rondins du slalom. Objectif éviter une perte d'équilibre suite à un changement de direction.

Travail sur les conséquences de :

- La baisse de l'acuité centrale et périphérique.
- Le rétrécissement du champ visuel
- La perte du gain de perception en vision dynamique par rapport à la vision statique.

Aspect ludique et cognitif:

Inspiré du Token Test qui est un test spécifique de la compréhension orale. Il est demandé au patient de toucher les parties colorées et ou les chiffres. Le soignant formule les consignes dans une séquence de plus en plus compliquée y compris l'addition.

Fonction de double tâche: Marcher et parler, marcher et compter, marcher et nommer les couleurs...




La marche

Observation de la marche spontanée, polygone de sustentation, ballant des bras, posture...

[Découvrir en vidéo](#)



Existe en version bois à sceller EN.SL ou sur platines ENSLt. En métal à sceller EN.SLa et en version sur platine EN.SLat

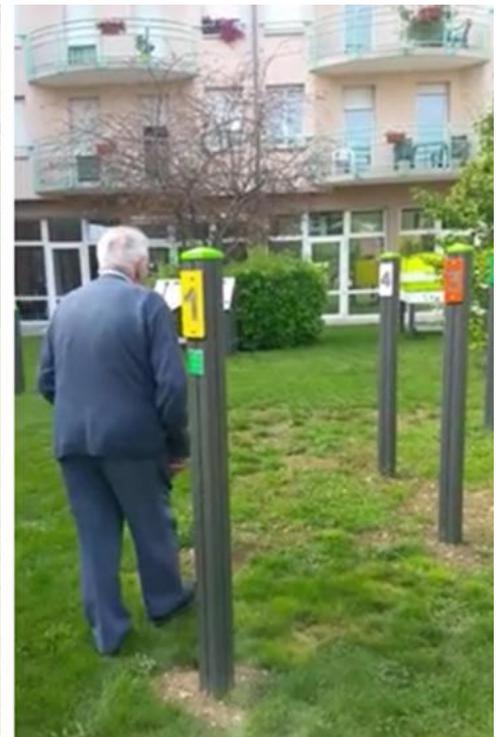

Passage sol meuble réf: EN.PSM

EN.PSML en 114cm et EN.PSME en 67 cm. Permet au patient de marcher sur un sol meuble et d'adapter son pas en fonction du sol.

La marche et la proprioception.

EN.PSME version étroite.



EN.PSML version large.



EN.PSMLa version large en métal, aluminium et inox.



Ci-dessus réalisation en bois pour terrasse ENPSMEt

Modèle large en bois EN.PSML



ENPSMEa version étroite en métal.



Atelier sur la sensibilité tactile plantaire : Travail de l'équilibre et de la marche sur un sol meuble. A remplir de sable, de graviers roulés, de galets ou d'écorces (non fournis).



ENPSMEa version étroite en métal. EN.PSMEa. Ces équipements existent aussi en version terrasse

Découvrir en vidéo : <https://youtu.be/91410KNz0E>



A droite passage sur sols meubles version corde et chaîne alternée d'une main courante en inox.



ENPSMCCa



ENPSMCC



Passage sols et rondins réf: EN.PSR2

Intérêts thérapeutiques : Travail de l'équilibre, de la cheville, ressenti plantaire. Exemples d'exercices proprioceptifs: Marcher sur différents types de sols (écorce, gravier roulés, sable, galets...) puis progresser sur un sol dur (demi-rondins et rondins).



La marche et la proprioception.



ENPSRa



Deux hauteurs de rondins

ENPSRat

Nous ne fournissons pas : Le sable, les graviers roulés, les galets, les écorces...



ENPSR

Cet équipement existe aussi en version étroite.

Passage sol meuble double, corde et chaîne réf: EN.PSMCCDa



Les équipements existent en version : bois ou métal pour sols meubles (gazon) ou pour terrasses.

Passage sol meuble double réf: EN.PSMD



Trois mains courantes.